

ALLEGATO II

PREPARAZIONE ED INVIO CAMPIONI

PREMESSA

I campioni per gli esami di laboratorio devono giungere all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (CESME), entro 48 ore dal prelievo e conservati ad una temperatura di 4° C.

Considerata l'urgenza con la quale i campioni devono pervenire al CESME, qualora l'Istituto Zooprofilattico competente per territorio non sia in grado di rispettare i tempi riportati, deve dare istruzioni affinché i Servizi Veterinari delle Aziende USL provvedano ad inviarli direttamente.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE

- Esame sierologico: campione di sangue (almeno 10 ml).
- Esame virologico: milza, linfonodi meseraici, sangue con EDTA (almeno 10 ml).

Quando viene prelevato il sangue per l'isolamento virale è opportuno salassare animali in ipertermia. Se in allevamento sono presenti animali con grave sintomatologia clinica, si può procedere con l'eutanasia del capo, l'esame anatomo-patologico e il prelievo dei campioni per l'isolamento virale.

I campioni devono essere conservati a 4° C (**NON VANNO CONGELATI !**) e devono pervenire entro 48 ore all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

I campioni di sangue per gli esami sierologici devono essere sierati, il siero raccolto deve essere posto in provette della capacità di almeno 3 ml. I campioni di organo devono essere messi in contenitori sterili con tappo a vite, che devono essere ermeticamente chiusi.

Tutte le provette e i contenitori devono essere contrassegnati singolarmente riportando il codice di identificazione dell'animale.

I campioni raccolti devono essere posti in un sacchetto che deve essere accuratamente chiuso e disinfettato esternamente.

Il materiale confezionato deve essere posto in un contenitore termico in polistirolo con i siberini racchiusi in sacchetti per alimenti, in modo da evitare che lo scongelamento provochi una raccolta di liquido all'interno della scatola. Nel caso in cui la confezione con i campioni si muova eccessivamente all'interno del contenitore, se ne devono ridurre i movimenti.

I campioni durante il trasporto devono essere mantenuti a temperatura di refrigerazione.

Nello stesso pacco possono essere inviati anche campioni provenienti da aziende diverse, a condizione che, ognuno di questi sia accompagnato dall'apposita documentazione e che siano chiaramente identificabili.

Il pacco deve esser sigillato ed inviato a:

CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA PER LE MALATTIE ESOTICHE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G.
CAPORALE"
CAMPO BOARIO
64100 TERAMO

con la dicitura:

ATTENZIONE - MATERIALE BIOLOGICO - SOSPETTO DI BLUE TONGUE